

Sistema de cargado Accujet™ Pro




LUXSMART™
LUXSMART™



LUXGOOD™
LUXGOOD™

Guía de cargado para el inyector de LIO* precargada Accujet™ Pro con LUXSMART™, LUXSMART™ Crystal, LUXGOOD™ y LUXGOOD™ Crystal

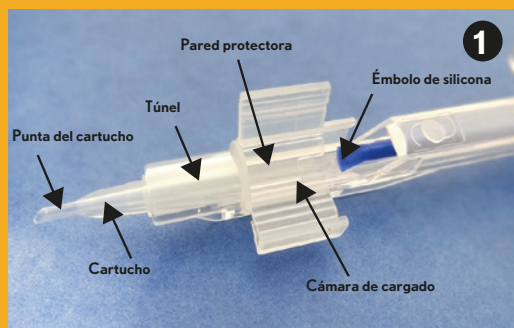


Accujet™ Pro es un sistema de inyección por presión completamente precargado de un solo uso. La LIO LuxSmart™ y el viscoelástico deben almacenarse al menos durante 30 minutos a un mínimo de 20°C antes de la cirugía




Abra el blíster y coloque el sistema de inyección sobre el campo estéril.




Enjuague la lente inyectando lentamente BSS* (a temperatura ambiente, no directamente de la nevera) desde el cartucho con la punta inclinada hacia arriba.

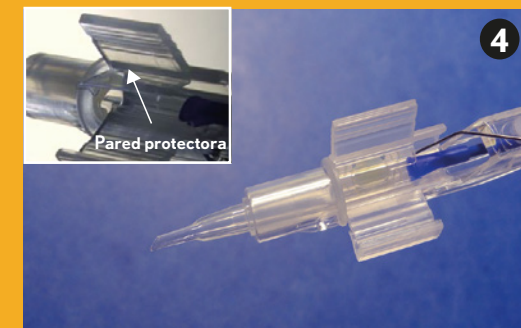

A continuación, aclare la lente desde la parte trasera del cartucho inclinándolo hacia abajo colocando la cánula cerca de la punta de silicona debajo de la pared protectora. El cartucho contiene un revestimiento que se activa cuando es hidratado por la adición de BSS*. El revestimiento fija una capa de fluido que asegura la lubricación. La hidratación completa de todas las piezas es obligatoria.

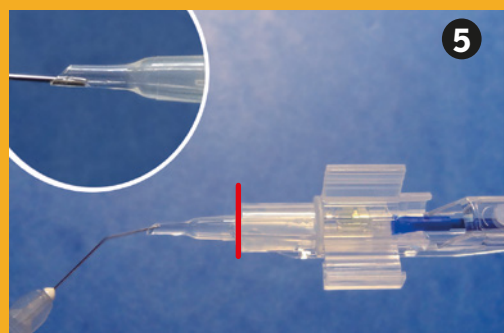

Aplique la solución viscoelástica** en la punta del cartucho hasta la línea roja.

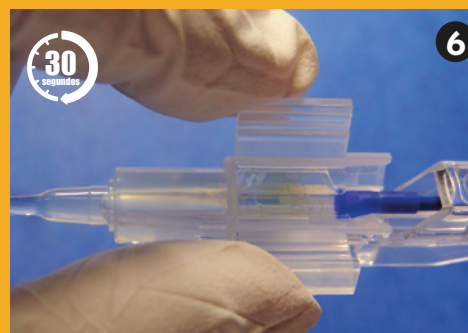


Espere 30 segundos.



Cierre las alas de la cámara de carga hasta que oiga un "click". El sistema ahora ya está listo para la inyección (no haga avanzar la lente en el túnel todavía); es el momento de dársela al cirujano.



ANTES DE LA IMPLANTACIÓN

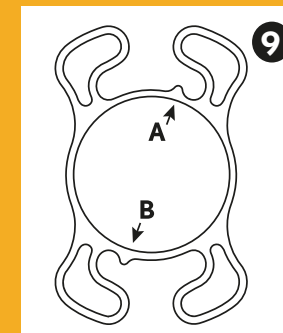

Una vez implantada, la parte superior de la lente debe estar orientada a la derecha (A) y la parte inferior de la lente a la izquierda (B).

@BauschSurgical

Bausch + Lomb Surgical

www.bauschoftalmologia.es

*BSS: Solución Salina Balanceada
**Amvisc® Plus, OcuCoat® y EyeFill® C.