

Bloxaphte® GEL

(ES) PRODUCTO SANITARIO: Tubo de 15 ml

Bloxaphte® Gel

- Alivia rápidamente las molestias y el dolor.
- Facilita la curación de las aftas bucales, reduciendo su duración.
- No contiene alcohol (no quema).
- No contiene parabenos.
- Sin azúcar.

Gracias a su composición específica, Bloxaphte® Gel produce una acción de barrera efectiva, que facilita la rápida reducción del dolor local y promueve la curación de las aftas bucales. El sabor a menta hace que sea más agradable.

COMPOSICIÓN:

Agua, xilitol, glicerina, extracto de pétalos de Rosa damascena, goma xantana, policarbófilo, sal sódica de ácido hialurónico, pectina, extracto de hoja de *Aloe barbadensis*, estevia, sorbato potásico, benzoato sódico, pantenol, sabor a menta.

USO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar una pequeña cantidad de gel en el área afectada, después de las comidas, con los dedos limpios o con un bastoncillo de algodón. Utilizar dos o tres veces al día (o más, si es necesario) durante una semana o hasta que los síntomas hayan desaparecido. Volver a colocar la tapa después de cada aplicación. Se recomienda no comer ni beber al menos durante 30 minutos después de la aplicación para facilitar la adhesión del producto. Utilizar en los 30 días siguientes a la apertura del envase.

No se recomienda utilizar este producto en niños menores de 30 meses.

EFFECTOS ADVERSOS:

Según la bibliografía científica, no hay efectos adversos conocidos o previsibles relacionados con el uso del producto. En caso de efectos indeseables durante su uso, acudir al médico.

ADVERTENCIAS:

- El producto se debe utilizar en la cavidad oral.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad a uno o más de los componentes.
- Cuando se utilice junto a otros productos, verificar con el médico las posibles interacciones.
- Si los síntomas no mejoran, acudir al médico
- Volver a colocar la tapa después de cada aplicación.
- La fecha de caducidad corresponde al producto intacto y guardado de forma adecuada.
- No superar la dosis diaria recomendada.
- No utilizar el producto si el envase está dañado o no está intacto.
- No utilizar pasada la fecha de caducidad impresa en el envase.
- Utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones.
- Desechar según corresponda.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

(PT) DISPOSITIVO MÉDICO: Bisnaga com 15 ml

Bloxaphte® Gel

- Para alívio rápido da sensação de desconforto e dor.
- Promove a cicatrização das aftas, reduzindo a sua duração.
- Não contém álcool (não arde).
- Não contém parabenos.
- Sem açúcar.

Gracias à sua composição especial, Bloxaphte® Gel atua com um efeito de barreira eficaz, permitindo um alívio rápido da dor local e promovendo a cicatrização das aftas. O sabor a menta torna-o agradável.

COMPOSIÇÃO:

Água, Xilitol, Glicerina, Extrato de pétalas de Rosa damascena, Goma xantana, Policarbófilo, Hialuronato de sódio, Pectina, Extrato de folhas de *Aloe barbadensis*, Stevia, Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio, Pantenol, Aroma de menta.

PARA AFTAS Y ESTOMATITIS AFTOSA
PARA AFTAS E ESTOMATITE AFTOSA

POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO:

Aplique uma pequena quantidade de gel na área afetada, após as refeições, com os dedos limpos ou com um cotonete. Usar duas ou três vezes por dia (ou mais, se necessário) durante uma semana ou até ao desaparecimento dos sintomas. Fechar imediatamente após cada utilização. Não é aconselhável comer ou beber durante pelo menos 30 minutos após a aplicação, para facilitar a aderência do produto. Utilizar no prazo de 30 dias após a primeira abertura. Não se recomenda a utilização deste produto em crianças com menos de 30 meses.

EFEITOS SECUNDÁRIOS:

Com base na literatura científica, não existem efeitos adversos conhecidos ou previsíveis relacionados com a utilização do produto. Caso detete quaisquer efeitos indesejáveis durante a sua utilização, consulte o seu médico.

ADVERTÊNCIAS:

- Utilizar o produto na cavidade bucal.
- Não utilizar em caso de hipersensibilidade individual a um ou mais dos componentes.
- Consulte o seu médico para verificar a possibilidade de interações com outros produtos administrados concomitantemente.
- Consulte o seu médico em caso de persistência dos sintomas.
- Fechar imediatamente após cada utilização.
- O prazo de validade corresponde ao produto intacto e corretamente conservado.
- Não exceder a dose diária recomendada.
- Não utilize o produto se o recipiente estiver danificado ou não estiver intacto.
- Não utilizar depois de expirado o prazo de validade indicado na embalagem.
- Utilizar o produto de acordo com as instruções.
- Eliminar devidamente.
- Manter o produto fora do alcance das crianças.

 Farmaceutici Procemsa S.p.A.
Via Mentana 10 – 10042
Nichelino (TO),
Italia / Itália


0476

Distribuidor:



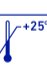


España:
Bausch & Lomb S.A.
Avda. Valdelaparra 4,
28108 Alcobendas, Madrid

Portugal:

Bausch & Lomb, S.A. - Suc. Portugal
Av. da República, nº 25, 6-A, 1050-186 Lisboa
®/™ are trademarks of
Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates
© Bausch & Lomb Incorporated

Fecha de revisión del texto: 02-2021
Data de revisão do texto: 02-2021

BAUSCH + LOMB 1433844
P1ESPT01

Descripción de los símbolos / Descrição dos Símbolos	
	Código de lote
	Fecha de caducidad: mes y año Utilizar até à data – Prazo de validade: Mês e Ano
	Fabricante
	Consulte en las instrucciones de uso la información importante sobre advertencias y precauciones. Consulte as instruções de utilização para obter informações importantes, tais como advertências e precauções.
	ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN: Guardar por debajo de 25 °C. La fecha de caducidad se refiere al producto intacto y guardado de forma adecuada. No utilizar pasada la fecha de caducidad del envase. ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO: Conservar a temperatura inferior a 25 °C. O prazo de validade refere-se ao produto intacto e devidamente conservado. Não utilizar depois de expirado o prazo de validade indicado na embalagem.
	Consulte las instrucciones de uso Consulte as instruções de utilização
	Los restos o el producto caducado pueden desecharse como residuo doméstico. Os resíduos ou produtos expirados podem ser eliminados como lixo doméstico normal.