

(ES) Lea detenidamente estas instrucciones de uso, ya que contienen información importante sobre la forma de utilizar el producto. Si tiene alguna duda, consulte a su farmacéutico, a su médico, o póngase en contacto con nosotros.

BAUSCH+LOMB

Vidisan® Alergia con Ectoin®

Ácido hialurónico al 0,24 % (como hialuronato sódico), Ectoin® al 2 %, cloruro sódico, hidróxido sódico (para el ajuste del pH) y agua purificada.

Uso previsto: Tratamiento de soporte y prevención de los síntomas de conjuntivitis alérgica, alivio de los ojos irritados y lubricante ocular.

¿Qué es Vidisan® Alergia con Ectoin®?

Vidisan® Alergia con Ectoin® es un producto sanitario que contiene Ectoin®, una molécula protectora de células natural, con propiedades reductoras de la inflamación y estabilizadoras de las membranas; y ácido hialurónico, una molécula natural que calma el ojo por su elevada capacidad de retención del agua y sus propiedades estabilizadoras.

Su formulación avanzada posee una muy alta tolerabilidad ya que no contiene conservantes ni estabilizadores del pH.

¿Para qué se utiliza Vidisan® Alergia con Ectoin®?

Vidisan® Alergia con Ectoin® es una solución isotónica que se puede utilizar para tratar y prevenir los síntomas de la conjuntivitis alérgica estacional y perenne provocada, por ejemplo, por el polen, los ácaros del polvo, el pelo de los animales o los hongos. Reducirá eficazmente el picor, la irritación, el enrojecimiento y el lagrimeo; su lubricación resultará en alivio. Basándose en los datos disponibles, este producto puede utilizarse en niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

¿Cuándo debes utilizar Vidisan® Alergia con Ectoin®?

Vidisan® Alergia con Ectoin® estabiliza la película lagrimal natural de dos formas: el ácido hialurónico influye positivamente en la fase acuosa y Ectoin® refuerza la fase lipídica. Esta doble acción protege al ojo de la influencia nociva de los alérgenos y otros factores externos y contribuye al proceso de regeneración de la conjuntiva irritada y sensible. Vidisan® Alergia con Ectoin® no contiene conservantes y es compatible con el uso de lentillas y apto para personas con ojos sensibles.


¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo debe utilizar Vidisan® Alergia con Ectoin®?

Instile en el ojo 1-2 gotas de Vidisan® Alergia con Ectoin® cuando sea necesario. Puede utilizarlo todos los días y con la frecuencia que desee. No hay ninguna limitación sobre el tiempo de uso.

¿Cómo se utiliza Vidisan® Alergia con Ectoin®?


El mecanismo de bombeo patentado de Vidisan® Alergia con Ectoin® permite que la solución no contenga conservantes, pero su aspecto puede diferir de los envases de colirios que usted haya utilizado en el pasado.

Las imágenes muestran lo fácil que es utilizar Vidisan® Alergia con Ectoin®

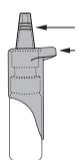


Tapa protectora
Zona de apoyo para el pulgar


1. Retire la tapa protectora del envase antes de cada uso. Asegúrese de no tocar el extremo del envase con los dedos.

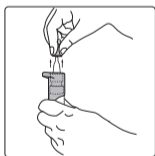

2. Coloque el dedo pulgar en la zona ergonómica de la parte superior y otros dos dedos en la parte inferior del envase.

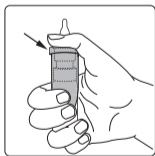

3. Dé la vuelta al envase y sujételo como se muestra en la ilustración. Tendrá que cebar la bomba antes de utilizarla por primera vez. Para ello, presione unas 7 veces la zona de apoyo del pulgar hasta que aparezca la primera gota.

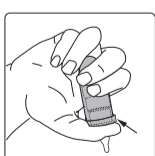

4. Para instilar el colirio incline ligeramente la cabeza hacia atrás y mantenga el envase sobre el ojo. Retire hacia abajo el párpado inferior con un dedo de la mano libre, sujete el envase en posición vertical y apriete suavemente en la zona de apoyo del pulgar para aplicar una gota en el ojo. Cierre después el ojo y muévelo lentamente para que la gota se distribuya bien por toda su superficie.



Si lo necesita puede utilizar la otra mano como ayuda para mejorar la precisión.

5. Procure que el extremo del envase no entre en contacto con el ojo ni con los dedos para evitar que la solución se contamine.
6. Vuelva a colocar la tapa en el extremo del envase después de cada uso.

¿Cuándo no debes utilizar Vidisan® Alergia con Ectoin®?

No utilice el producto si presenta hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Información importante sobre el uso de Vidisan® Alergia con Ectoin®

- Tenga en cuenta que la primera vez que lo usa o si hace tiempo que no lo utiliza, es necesario un bombeo inicial de la solución. Cuando bombee la solución, la punta del gotero debe mantenerse hacia abajo.
- En raras ocasiones se han registrado reacciones de hipersensibilidad local. Si esto sucede, deberá interrumpir el tratamiento.
- Este producto puede provocar visión borrosa transitoria tras la instilación, por lo que puede afectar negativamente a la capacidad de conducir o manejar maquinaria.
- No toque la superficie del ojo con el extremo del envase para evitar posibles lesiones en la superficie ocular.
- Sacuda cualquier posible gota residual que quede tras la aplicación.
- Utilizar de forma descuidada el producto o de forma contraria a las instrucciones de uso puede provocar que el producto se deslice de las manos y causar una lesión ocular.
- Espere unos 15 minutos antes de utilizar otro producto ocular.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad.
- No utilice el producto si observa algún daño en el envase.
- Vidisan® Alergia con Ectoin® está compuesto de pequeñas partes de plástico que pueden ser tragadas por niños pequeños. Riesgo de asfixia. Por tanto, Vidisan® Alergia con Ectoin® debe mantenerse alejado del alcance de los niños.
- Vidisan® Alergia con Ectoin® es compatible con el uso de lentillas blandas y rígidas.

Conservación de Vidisan® Alergia con Ectoin®

Almacenar a temperaturas comprendidas entre 2 °C y 25 °C.

El diseño del envase permite utilizar Vidisan® Alergia con Ectoin® 6 meses tras su apertura.

Presentación:

Vidisan® Alergia con Ectoin® está disponible en envases de 10 ml o 15 ml de colirio. Puede que no estén comercializados todos los formatos. Vidisan® Alergia con Ectoin® también está disponible en cómodos envases monosodsis (SDU), también sin conservantes.

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin (Germany)

Distribuidor en España

Bausch & Lomb S.A.
Avda. Valdelaparra, 4
Alcobendas, 28108 - España

CE 0483

Explicación de los símbolos utilizados en el producto:

STERILE A Esterilizado mediante técnicas de procesamiento aséptico



Límite de temperatura



No utilice el producto si el envase está dañado.



Consulte las instrucciones de uso



Desechar el producto 6 meses tras la primera apertura



Fecha de caducidad



Lote



Precaución (consulte las precauciones en las instrucciones de uso)



Fabricante

Vidisan® Alergia con Ectoin®, 2018-07

Los símbolos ®/™ son marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated o sus filiales.
© Bausch & Lomb Incorporated