


- 1. Conectamos el equipo** al Aire Comprimido (presión requerida: entre 5 y 6,9 Bar) y a la Conexión Eléctrica. Luego, pulsamos el botón verde frontal.
- 2. Activamos el Pedal Inalámbrico** presionando uno de los 4 botones durante 1 segundo.
- 3. Seleccionamos Procedimiento, Cirujano** y confirmamos.



**4. Preparación.**

- ✓ Abrimos el pack y depositamos su contenido sobre una superficie estéril.
- ✓ Identificamos todos los componentes.
- ✓ Colocamos la bolsa protectora estéril en la bandeja del equipo.

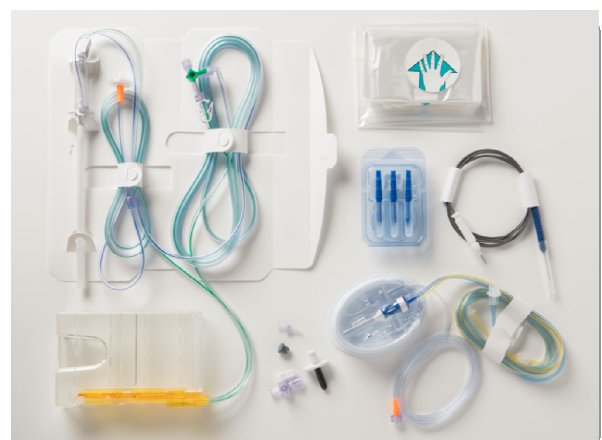

## 5. Montaje.

### ✓ **Conexión de las líneas del casete.**

- ✓ Insertamos el casete y conectamos el filtro de aire. Una vez el equipo haya realizado la comprobación de vacío del casete, de forma automática avanzará a la pantalla *Cebar y Calibrar*.
- ✓ Perforamos la botella (con perforador que viene en la bolsa de accesorios), introducimos el vástago metálico hasta el fondo, y la colgamos en la asa baja.



*\*Importante:* Insertar el casete y conectar el filtro antes de pinchar y colgar la botella.

*\* No desechar el perforador por si es necesario pinchar una segunda botella de BSS.*

### ✓ **Conexión de las líneas de la batea.**


- ✓ Conectamos la línea de aire neumático del vitreotomo (azul).
- ✓ Conectamos la línea de aspiración del vitreotomo (amarilla) y la línea de extrusión (transparente) al casete.



## 6. Cebado y Calibrado.



- ✓ Reconectamos la vía de infusión a la llave de 3 vías.
- ✓ Deshacemos la cinta que envuelve la batea y comprobamos que dentro de ella se encuentra el vitreotomo, la línea de extrusión y la línea de infusión.

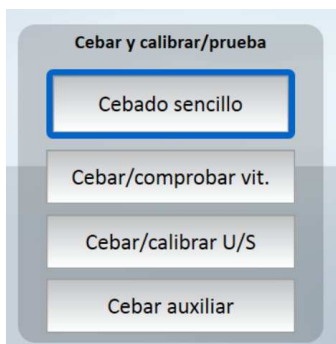

- ✓ Pulsamos botón **Cebado Sencillo** en la pantalla de Configuración. Cuando acabe todo el proceso de cebado, el sistema pasará automáticamente a la *Pantalla de Cirugía*.

### ✓ **Calibración del mango de Fragmentación**

Si estamos en la Pantalla de Cirugía, debemos regresar a la *Pantalla de Configuración*.



- Enroscamos la aguja de fragmentación, conectamos la línea de extrusión al mango y conectamos éste al equipo.
- Pulsamos **Cebado/calibrar U/S** manteniendo la aguja sumergida en líquido.
- Si el equipo no lo hace automáticamente, pulsaremos **Avanzar a Cirugía**.

## 7. Cirugía COMBINADA, Montaje y Calibrado adicional.

En el caso de una Cirugía Combinada, una vez realizado el **Cebado Sencillo**, el equipo no pasará a la **Pantalla de Cirugía** sino que permanecerá en la **Pantalla de Configuración** a la espera de que realicemos la calibración del mango de facoemulsificación.



- ✓ **Montaje.** Montamos la aguja con el capuchón y la cámara de prueba en el mango, conectamos el mango al equipo y le conectamos las líneas de extrusión (transparente) y de irrigación (verde -misma que infusión-).


Cebar/calibrar U/S

- ✓ **Calibrado.** En la **Pantalla de Configuración** pulsamos **Cebar/Calibrar U/S**. El equipo pasará automáticamente a la **Pantalla de Cirugía**.

- ✓ Al finalizar la cirugía de Catarata, desconectaremos las líneas del mango de faco y reconectaremos la de irrigación (verde) a la llave de 3 vías. Cebaremos manualmente la vía de infusión (Activándola por pantalla y abriendo el clampador).

**\*Importante:** Siempre seleccionaremos una fase de segmento posterior antes de abrir la infusión una vez esté conectada al ojo.

## 8. Inicio de la Cirugía.

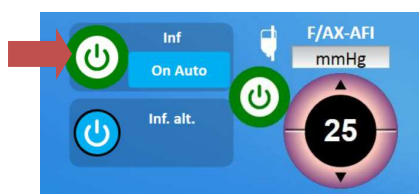

- ✓ Al empezar la cirugía deberemos **activar la infusión** por pantalla. A partir de ese momento podremos abrirla o cerrarla por la misma pantalla o por el clampador de la línea de infusión.



- ✓ Para poder conectar una cánula a la línea de extrusión (línea transparente), deberemos utilizar el conector *macho-macho* que viene en el pack.

- ✓ Manejo del clampador y las llaves de 3 vías:

• **Clampador:** abrir/cerrar infusión.



Posición entrada líquido

• **Llave Verde:** intercambio líquido-aire.



Posición entrada aire

• **Llave accesoria:** intercambio aire-gas



Posición entrada gas

## 9. Finalización.



Al pulsar **Fin** podremos ir a **Paciente Siguiente** o **Apagar el Sistema**.