

¿Qué son las toallitas estériles para los párpados?
Son unas toallitas estériles de viscosa, de un solo uso, que están impregnadas de una solución fisiológica estéril sin conservantes ni detergentes.

O que são as toalhitas esterilizadas para pálpebras?
São toalhitas estériles, viscosas, e de utilização única, impregnadas de uma solução fisiológica estéril, sem conservantes nem detergentes.

Toallitas para la higiene diaria de párpados y pestañas como parte del tratamiento de la blefaritis, la alergia y las infecciones oculares

Toalhitas para higiene diária de pálpebras e pestanas como parte do tratamento de blefarite, alergia e infeções oculares



ELWC-40-M8-CV1

CIESPT01

BAUSCH + LOMB



Suavidad y limpieza natural

Toallitas estériles para la higiene diaria de párpados y pestañas como parte del tratamiento de la blefaritis, la alergia y las infecciones oculares

Sin conservantes
Sin detergentes
Solo para uso externo
Uso individual

- Efecto relajante y calmante
- Elimina los residuos suavemente
- Limpia las secreciones y descamación de los párpados
- Refrescante
- Adecuado para ojos sensibles
- Apto para bebés y adultos

Solo para uso externo
Uso individual
ESTÉRIL HASTA EL MOMENTO DE LA APERTURA

Precauciones y advertencias en el interior de la caja

20
TOALLITAS ESTÉRILES

¿Para qué se usan las toallitas estériles para los párpados? Para la higiene diaria de párpados y pestañas como parte del tratamiento de la blefaritis y para la limpieza de las secreciones y descamación de los párpados provocados por una alergia o infección ocular. Las toallitas ayudan a aliviar los síntomas de:

- Enrojecimiento, inflamación y dolor de los párpados
- Picores, irritación y molestias en los párpados
- Aparición de descamación o secreciones grasas en los párpados y las pestañas

Combate las principales sensaciones de la sequedad ocular, basándose en las aportaciones de destacados expertos acerca de la disfunción de las glándulas de Meibomio (DGM), causante de la blefaritis y la sequedad ocular.

Composición: Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidratado, cloruro de magnesio hexahidratado, acetato de sodio, citrato de sodio dihidratado, agua purificada.

Cómo utilizar la toallita: Debido a la posible presencia de bacterias altamente contagiosas en cada uno de los párpados, se recomienda utilizar una toallita distinta para cada ojo.

Instrucciones de uso: Antes de utilizar una toallita, compruebe que la bolsita se encuentre en perfecto estado. No utilizar si la bolsita está abierta o dañada.

- Lávese y séquese bien las manos antes de cada uso
- Extraiga la toallita de su bolsita
- Si utiliza lentes de contacto, quíteselas antes de usar la toallita
- Cierre el ojo y pase la toallita desde el vértice nasal del ojo hacia afuera, llegando a cubrir las pestañas
- Deseche la toallita inmediatamente después de su uso

CE 0120 **STERILE R** 1°C 25°C

Distribuido por:
Bausch & Lomb S.A.
28108 Alcobendas-Madrid

Medicom Healthcare Ltd.,
235 Hunts Pond Road, Fareham,
Hampshire, PO14 4PJ, U.K.

C.N: 1777515

8 470001 777515

BAUSCH + LOMB



Suavidade e limpeza natural

Toalhitas esterilizadas para higiene diária de pestanas e pálpebras como parte do tratamento de blefarite, alergias e infeções oculares

Sem conservantes
Sem detergentes
Apenas para utilização externa
Utilização única

- Efeito relaxante e calmante
- Elimina os resíduos suavemente
- Limpa as secreções e descamações das pálpebras
- Refrescante
- Adequado para olhos sensíveis
- Apto para bebés e adultos

Apenas para utilização externa
Utilização única
ESTERILIZADA ATÉ SER ABERTA

Consulte precauções e avisos dentro da caixa

20
TOALHITAS ESTERILIZADAS

Para que são utilizadas as Toalhitas Esterilizadas para Pálpebras? Para a higiene diária de pestanas e pálpebras como parte do tratamento de blefarite e para limpeza de secreções e descamações das pálpebras provocadas por alergias oculares ou infeções oculares. Ajuda a aliviar os sintomas de:

- Pálpebras doridas, inflamadas e vermelhas
- Desconforto, irritação e prurido nas pálpebras
- Aparecimento de descamação ou secreções de gordura nas pálpebras ou nas pestanas

Para combater as principais sensações da secura ocular, com base nas conclusões de especialistas líderes na questão de disfunção das glândulas de Meibomio (MGD), causadora de blefarite e secura ocular.

Composição: Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio dihidratado, cloreto de magnésio hexahidratado, acetato de sódio, citrato de sódio dihidratado, água purificada.

Como utilizar a toalhita? Poderão existir bactérias altamente contagiosas em cada pálpebra, assim, utilize uma toalhita nova para cada olho.

Instruções de utilização: Antes de utilizar uma toalhita, por favor, verifique a integridade da saqueta. Não utilizar se estiver aberta ou danificada.

- Lave e seque as suas mãos antes da utilização
- Retire a toalhita da saqueta
- Se for utilizador(a) de lentes de contacto, retire as mesmas antes da utilização
- Feche o olho e limpe desde o canto nasal do olho para fora, por cima das pestanas
- Descarte a toalhita imediatamente depois do uso

Biotrue is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
©Bausch & Lomb Incorporated.

Distribuído por:
Bausch & Lomb
Avda. da República, nº 25, 6-A
1050-186 Lisboa-Portugal

PORTUGAL

6966424

NO VARNISH AREA

