

Lea detenidamente estas instrucciones de uso, ya que contienen información importante sobre la forma de utilizar el producto. Si tiene alguna duda, consulte a su farmacéutico, a su médico, o póngase en contacto con nosotros.

**BAUSCH + LOMB**

## Lipolac Noche

Carbómero 2 mg/g, triglicéridos de cadena media

Uso previsto: **Lipolac Noche** es un lubricante oftálmico en gel

### ¿Qué es Lipolac Noche?

**Lipolac Noche** es un gel de uso oftálmico. 1 g contiene 2 mg de carbómero y triglicéridos de cadena media, además agua estéril, sorbitol e hidróxido sódico. El conservante utilizado es cetrimida.

### ¿Cuál es la aplicación de Lipolac Noche?

**Lipolac Noche** es un lubricante ocular altamente viscoso que mantiene las tres capas de la película lagrimal para proporcionar una humectación duradera y protección de la superficie ocular ante la presencia de sensación de ojo seco.

### ¿Cuándo debe utilizar Lipolac Noche?

**Lipolac Noche** está diseñado para complementar la película lagrimal, incluida la importante capa lipídica externa, para conseguir máximo alivio y retención de humedad en la superficie del ojo. Calma e hidrata los ojos, al mismo tiempo que retiene la humedad para proporcionar un alivio duradero.

Es un producto ideal para aquellas personas que sufren diversos síntomas de sequedad ocular, como ojos cansados, sobrecargados, con sensación de arenilla, escozor o lagrimeo.

Estas personas también podrán beneficiarse de una protección adicional al usar este producto de forma complementaria a su producto original para ojo seco.

La sequedad ocular está causada por:

- Factores externos, como el uso prolongado del ordenador, el aire acondicionado, la calefacción y el humo del tabaco, así como el viento o el uso de lentes de contacto.
- Otros factores, como determinados fármacos (píldora anticonceptiva, antihistamínicos, betabloqueantes, antiespasmódicos y diuréticos) y algunas enfermedades que pueden desempeñar un papel importante en la sequedad ocular.

### ¿Con qué frecuencia se puede utilizar Lipolac Noche?

Instile una gota de **Lipolac Noche** gel en el ojo 15 minutos antes de acostarse si lo utiliza por la noche, y/o entre 3 y 5 gotas de gel o con mayor frecuencia si es necesario durante el día.


### ¿Cómo se utiliza Lipolac Noche?



1. Retire el tapón protector del tubo antes de cada uso.



2. Incline ligeramente la cabeza hacia atrás, tire suavemente del párpado inferior con un dedo de la mano libre y sujete el tubo en posición vertical sobre el ojo, con el envase hacia abajo. Apriete suavemente el envase para aplicar una gota de gel.

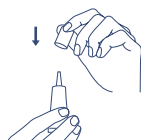

3. Vuelva a colocar el tapón en el tubo después de cada uso.

Cierre el ojo y muévelo a un lado y a otro. Después parpadee para que la gota de gel se reparta bien por toda la superficie del ojo.

### ¿Cuándo no se debe utilizar Lipolac Noche?

No utilice el producto si presenta hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

### Información importante sobre el uso de Lipolac Noche

- En raras ocasiones se han registrado reacciones de hipersensibilidad local. Si esto sucede, deberá interrumpirse el tratamiento.
- Este producto puede causar visión borrosa transitoria después de la instilación, lo que puede afectar negativamente a la conducción de vehículos o al manejo de maquinaria.
- No toque la superficie del ojo con el extremo del tubo para evitar posibles lesiones.
- Quitese las lentes de contacto antes de usar el producto.
- Espere unos 15 minutos antes de utilizar otro producto ocular o antes de volver a ponerse las lentes de contacto.
- Procure que el extremo del tubo no entre en contacto con el ojo ni con los dedos para evitar que la solución se contamine.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad.
- No utilice el producto si observa algún daño en el tubo.

### Conservación de Lipolac Noche

Almacenar a temperatura inferior a 25°C.

Una vez abierto, puede utilizarse durante 6 semanas.

### Presentación:

**Lipolac Noche** se presenta en tubos de 10 g.

Graphics&Packing Technology Section ICN POLFA RZESZÓW S.A.		ULOTKA PIL		<b>BAUSCH + LOMB</b>	
Nazwa produktu Product Name	Lipolac Noche GEL /Carbómero/		Kolor nadruku Colours		
		PMS 281 U			
Kraj Country (ISO)	ES		Nr wykrojnika Spec No	12036	
Opracowane przez Designed by	Zofia Tabisz-Mikosz Zofia.Tabisz-Mikosz@ Valeant.com phone: +48 17 865 5536		Kod Wytwórcy Manufacturer code	47131PB174/1-ES	
Nr korekty Proof No	4	Data Date	10.08.2020	Kod farmaceutyczny Pharmacode	234
Kod wersji Valeant version code	P1ES01		Inny kod Other code	-	
Rozmiar czcionki Font size	minimum 9 pt		Wymiar ulotki PIL size	120 x 360 mm	
Krój czcionki Font used	Nobel BL Book Nobel BL Regular Nobel BL Medium Nobel BL Bold		Gramatura papieru Paper weight	- g/m <sup>2</sup>	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
Launch of a lubricant eye gel launch named Lipolac Noche, as medical device, using existing formula (#174). PMR_ICN-20-0630-A Factory (Packing site): DMP Berlin corr. #4, 5 Ł. K.					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					
<div style="border: 2px solid green; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e0f0e0;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: green; margin: 0;">APROBADO</p> <p style="font-size: 18px; color: green; margin: 0;">Por Ana de la Figuera fecha 10:32 , 17/08/2020</p> </div>					

### Símbolos

#### Símbolo



#### Descripción

Esterilizado mediante técnicas de procesamiento aséptico



Límite superior de temperatura



Deseche el producto 6 semanas después de su apertura.



No utilice el producto si observa algún daño en el tubo.



Consulte las instrucciones de uso



Fecha de caducidad



Lote



Fabricante

**Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH**  
Brunsbütteler Damm 165/173  
D-13581 Berlín.  
Alemania.

**Distribuidor:** Bausch & Lomb S.A.  
Avda. Valdelaparra 4  
28108 Alcobendas, Madrid.

CE 0483

**Lipolac Noche, Revisión: 01**  
**Fecha de revisión del texto: 2020-06**

Los símbolos ®/™ son marcas comerciales de Bausch & Lomb Incorporated o sus filiales.  
© Bausch & Lomb Incorporated