


BAUSCH + LOMB
Recugel®
PT Instruções de Utilização

Solução viscosa com Dexpanthenol.
Para melhorar a hidratação da superfície ocular e proteger o olho saudável.

Composição

1 bisnaga de Recugel® contém 10 g de gel oftálmico.
1 g de gel oftálmico contém 50 mg de Dexpanthenol, assim como carbómero, edetato dissódico, hidróxido de sódio, água e cetrimida, como agente conservante.

Utilização de Recugel®


Recugel® tem um efeito refrescante e calmante nos olhos. Melhora a hidratação da superfície ocular quando existe sensação de olho seco, ardor ou cansaço ocular causados, por exemplo, por ver televisão ou trabalhar com ecrãs digitais durante longos períodos de tempo, por ar proveniente de sistemas de aquecimento ou ar condicionado.

Recugel® contém a substância dexpanthenol para proteção de olhos saudáveis. Dexpanthenol pertence às vitaminas do complexo B.


Utilização correta e segura de Recugel®

A figura mostra a utilização simples e fácil do produto.

Segure a bisnaga na posição vertical acima do olho e puxe suavemente para baixo a pálpebra inferior. Aplique uma gota em cada olho, apertando ligeiramente a bisnaga. Por favor, assegure-se de que a bisnaga está na posição vertical enquanto faz a aplicação.

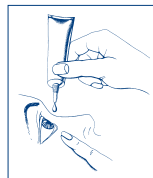
Precauções

Não utilize se a bisnaga estiver danificada.

Assegure-se de que a ponta da bisnaga não toca no olho ou nos dedos, para prevenir qualquer possível contaminação do gel. Feche a bisnaga com a tampa protetora imediatamente após cada utilização.

Uma vez aberta, não partilhe a bisnaga com ninguém.

Se está a utilizar mais do que um produto ocular, aguarde pelo menos 15 minutos entre a aplicação das gotas.

As lentes de contacto devem ser removidas antes da utilização de Recugel® e não podem ser reinseridas até, pelo menos, 15 minutos após a aplicação, uma vez que o produto pode manchar a superfície das lentes de contacto.

Este produto pode causar temporariamente visão turva devido à formação de aglomerados do produto, o que influencia a capacidade de reação na condução de veículos e manuseamento de máquinas.

Em casos muito raros, podem ocorrer reações de hipersensibilidade. Se ocorrerem reações de hipersensibilidade, interrompa a utilização



do produto.

Em caso de gravidez ou durante a amamentação, consulte o médico antes de utilizar o produto.

Conservação

Conserva o produto a uma temperatura compreendida entre +1 °C e +25 °C.

Descarte o produto 1 mês e meio após a sua abertura.





ES Instrucciones de uso

Solución viscosa con dexpantenol.

Para mejorar la hidratación de la superficie ocular y proteger los ojos sanos.

Composición

1 tubo de Recugel® contiene 10 g de gel ocular.
1 g de gel ocular contiene 50 mg de dexpantenol, así como carbómero, edetato disódico, hidróxido sódico, agua y cetrimida como agente conservante.

Aplicación de RECUGEL®


RECUGEL® produce un efecto refrescante y calmante en los ojos. Mejora la humectación de la superficie ocular en caso de sensación de sequedad, quemazón o fatiga en los ojos, provocada, por ejemplo, por ver la televisión durante mucho tiempo o por trabajar frente a pantallas de ordenador, así como por el aire de los sistemas de calefacción o de aire acondicionado.

RECUGEL® contiene dexpantenol para proteger los ojos saludables. El dexpantenol pertenece al grupo de la vitamina B.

Seguridad y uso correcto de RECUGEL®

La ilustración muestra el uso sencillo y fácil del producto.

Mantenga el tubo en posición vertical por encima del ojo y tire con delicadeza del párpado inferior. Instile una gota en cada ojo apretando ligeramente el tubo. Por favor, no olvide mantener el tubo en posición vertical mientras aplica el producto.

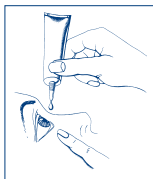

CE 0483



Bausch & Lomb GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin Germany

Distribuidor em Portugal: Bausch & Lomb, S.A. - Suc. Portugal, Av. da República, nº 25, 6-A, 1050-186 Lisboa, Portugal
Distribuidor en España: Bausch & Lomb, S.A.-Avda. Valdelaparra, 4-28108 Alcobendas-Madrid-ES




Deseche el gel no utilizado una vez transcurridas 1 mes y medio
Descarte o produto 1 mês e meio após a primeira abertura



No utilizar si el embalaje está dañado
Não utilize se a embalagem estiver danificada

STERILE A

Estéril mediante técnica aséptica
Esterilizado mediante técnicas de processamento assético.

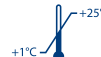

Límite de temperaturas
+1°C a +25°C
Limite de temperaturas



Consulte las instrucciones de uso
Consulte as instruções de utilização



Lote
Número de Lote
Caducidad
Data de validade



Fabricante
Fabricante

Recugel®, Rev.1, 08-2019
Producto nº/Produto n.º: 300

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
© Bausch & Lomb Incorporated.

P1ESPT
49695PB300/5-ESPT

